

MonBaby スマートボタン体動センサ 取扱説明書


1. はじめに
2. MonBabyスマートボタンをお使いになる前の準備
 - iPhoneをご利用の方
 - ①アプリのインストール
 - ②アプリの初期設定
 - ③センサーの接続確認
 - Androidをご利用の方
 - ①アプリのインストール
 - ②アプリの初期設定
 - ③センサーの接続確認
3. アプリの基本的な使い方
4. 赤ちゃんのモニタリングを停止するには
5. お好み設定 (アラートの変更)
6. お好み設定 (アラーム音の変更)

保証書

1.はじめに

- MonBabyスマートボタンをお使いになる前には事前に3つの準備が必要です。
 - ①アプリのインストール
 - ②アプリの初期設定
 - ③センサーの接続確認
- 事前の準備が完了したら、お子さまの肌着やパジャマにセンサーを装着してお使いください。装着方法は次のページ(P3)をご参照ください。
- センサー本体への設定は必要ありません。

センサーの装着方法

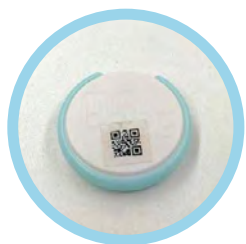

センサーは、本体とケースのセットになっています。
この本体とケースの間に布を挟み込んで装着します。

※お届けする商品にはQRコードはついておりません。


●センサーと本体をケースに分ける



ケースの周りを指で支え、裏側から本体を親指で押します。



押した反動で本体が飛ばないようにご注意ください。

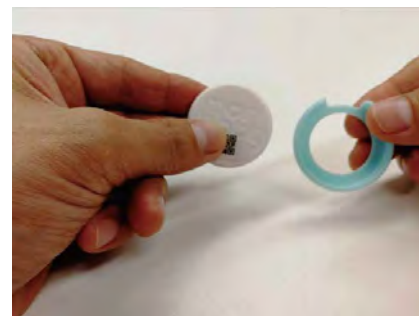

上記のように本体とケースに分けたら、別々にしておきます。


●赤ちゃんの衣服に装着する



ケースを服の内側から写真のように入れ、お腹の上辺りまで持っていきます。



体から離れるとアラートが鳴りやすくなりますので、肌着などに取り付けてください。

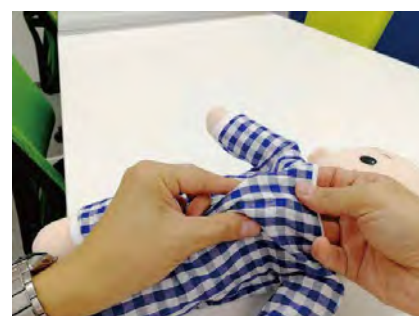

※センサーが高温になることはございません。



ケースの上から、センサー本体押し込み、パチンと完全に挟み込んでください。



※その際、皮膚を挟まないようご注意ください。



このように「monbaby」と書かれた面が上になるようにして取り付けてください。

2. MonBabyスマートボタンをお使いになる前の準備

iPhoneご利用の方


①アプリのインストール



App Storeをタップします。



検索タブをタップします。

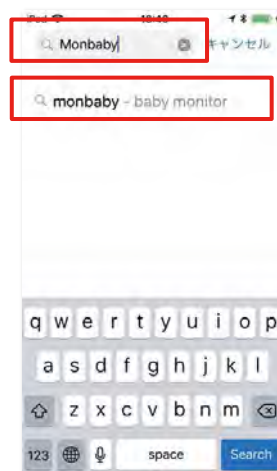


検索窓に「monbaby」と入力、「monbaby - baby monitor」と表示されたらそちらをタップします。




この画面のアプリが表示されたら「入手」をタップしてインストールを行ってください。

②アプリの初期設定 1/2

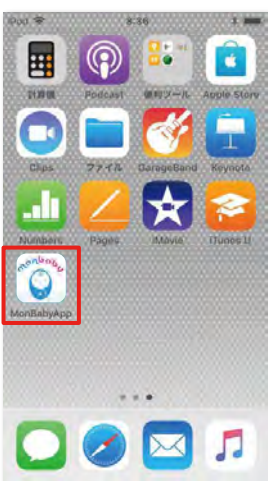


「monbaby」と書かれたアイコンをタップします。

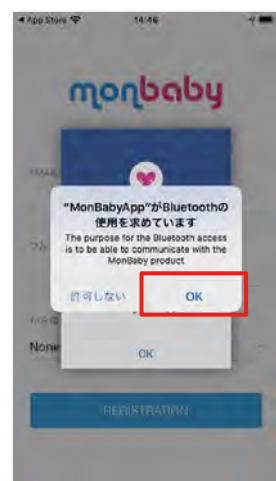

Bluetoothの使用を求めています～の画面で「OK」をタップします。




通知を送信します～の画面で「許可」をタップします。
※許可しないにすると、アラートが届きません。

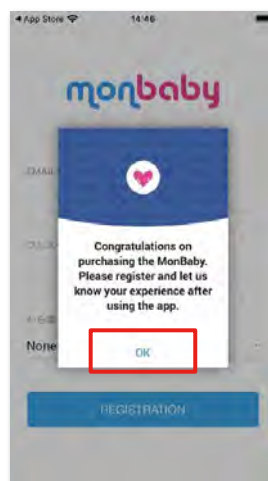


「OK」をタップします。

iPhoneご利用の方


②アプリの初期設定 2/2

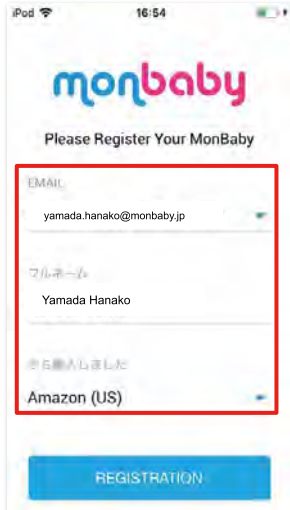

Email、フルネーム、購入先を入力します。

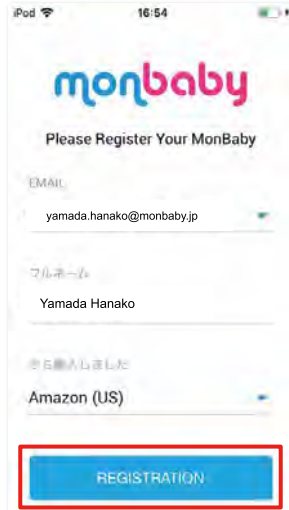

入力し終わったら「REGISTRATION」をタップします。

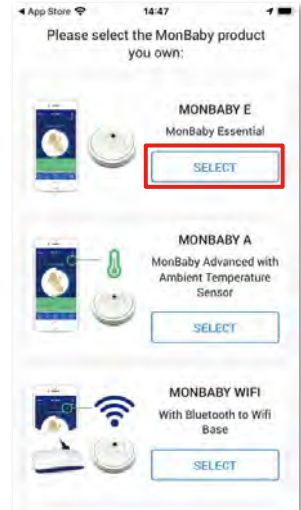

「MonBaby E」を選択してください。

iPhoneご利用の方

③センサーの接続確認




ロゴ面を上にしたセンサーを平らな机等の上に置き、「接続します」をタップします。



接続したいデバイスを選択し、「Tap to connect」をタップします。
※デバイスが複数表示される場合は周りに通信する機器がない場所に移動してください。



お子様のお名前か、任意の文字を入力し、「適用する」をタップします。

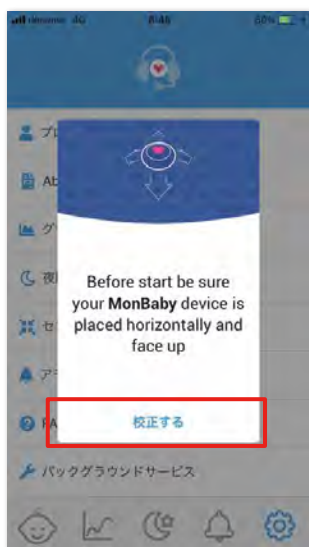

センサーを平らなところに「monbaby」の面を上にして置き、「校正する」をタップします。

↓上の面



この画面では何も操作せず、処理が終わるのをお待ちください。



この画面が出たら使用準備は完了です。

※そのまま放置するとアラームがなりますので、装着前に一旦センサーとの接続解除をおすすめします。

Androidご利用の方

①アプリのインストール



Google Playをタップします。




検索窓に「monbaby」と入力します。



「MonBaby Smart button」というアプリが表示されたら、インストールを行ってください。

②アプリの初期設定 1/2

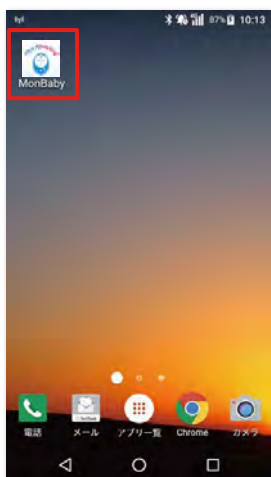

「monbaby」と書かれたアイコンをタップします。



～アクセスを許可しますか？の画面で「許可」をタップします。




右下の「skip」をタップします。




Bluetoothの設定を「許可」をタップします。

Androidご利用の方


②アプリの初期設定 2/2

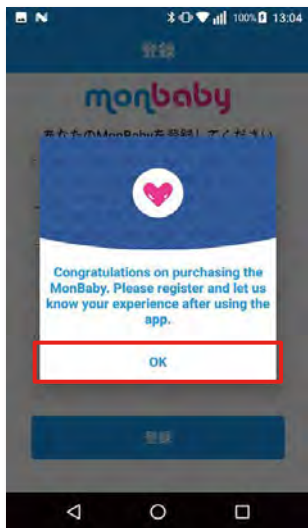

「OK」をタップします。

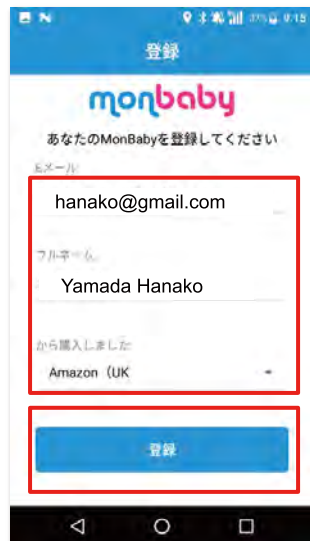

ご自身のEmail、フルネーム、購入先を入力します。

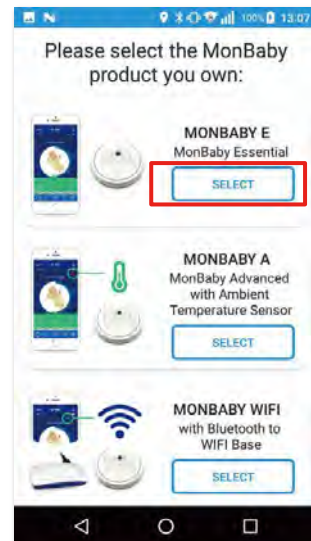

「MonBaby E」を選択してください。

Androidご利用の方

③センサーの接続確認



ロゴ面を上にしたセンサーを平らな机等の上に置き、「接続」をタップします。



接続したいデバイスを選択し、「Connect」をタップします。
 ※端末が複数表示される場合は周りに通信する機器がない場所に移動してください。



お子様のお名前か、任意の文字を入力し、「適用する」をタップします。



センサーを平らなところに「monbaby」の面を上にして置き、「センサーとの接続を確認」をタップします。

↓上の面



この画面では何も操作せず、処理が終わるのをお待ちください。



この画面が出たら使用準備は完了です。

※そのまま放置するとアラームがなりますので、装着前に一旦センサーとの接続解除をおすすめします。

3. アプリの基本的な使い方

●基本画面 (Dashboard) の説明

センサーとの接続を解除し、アプリ利用前の状態に戻ります。
※こちらをせずにアプリを閉じて、センサーは動作し、状態に応じてアラートが鳴動します。

体の向きを表示します。
体の向きは以下の3パターンです。
・仰向け
・横向き
・うつぶせ

体動を感知しているゲージです。

体動をグラフで表示します。



アラートを鳴らしたくない時にスヌーズ設定をすることができます。

センサーの電池の状態や、接続状態を表示します。

活動レベル: 正常
✓ 接続されています

矢印を展開すると、センサーの接続情報が確認できます。

プロフィールを設定できます。

体動をグラフで表示します。



使用中にセンサーの接続が切れた場合にはこちらで接続を確認します。



アプリの情報を表示します。

夜間モードに切り替えます。

アラートの設定を変更します。
※次ページもご参照ください。

●アラートが鳴ったら



アラートが鳴ったら、お子様の状態を確認した上で、「クリア」をタップしてください。

※「クリア」をタップしない限り、アラートは鳴り続けます。

●アラートを鳴らしたくない時は



「設定」をタップします。



「アラートオプション」から、各アラートのON/OFFが変更できます。

4.赤ちゃんのモニタリングを停止するには

●MonBabyのアプリから「ログアウト」をしてください



アプリのダッシュボード画面から、「ログアウト」をタップします。




「はい」を選択してください。
※ログアウトをせずにアプリを閉じても、センサーは動作し続けます。そのため、状態に応じてアラートが鳴動します。

●モニタリングを再開するには再接続をしてください 1/2



アプリを起動し、「接続」をタップします。

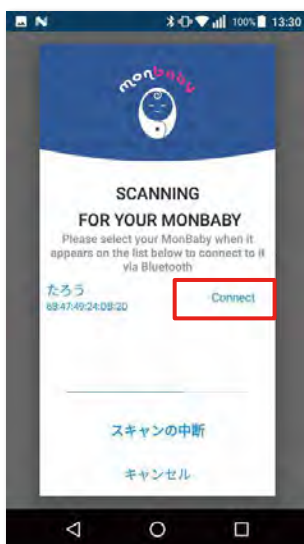

ご自身のセンサーを選択し、「connect」をタップします。



接続が完了するまで、そのままお待ちください。

●モニタリングを再開するには再接続をしてください 2/2



「monbaby」のロゴ面を上にして平らな場所に置き、「センサーとの接続を確認」をタップします。

「センサーとの接続が完了しました」と表示されると、接続は完了です。

5. お好み設定(アラートの変更)

<アラート状態表示>



OFFの状態

タップすることでON/OFFが切り替わります。



ONの状態



体動(呼吸)が感知されない時にアラートを出す設定です。

うつ伏せ寝になったときにアラートを出す設定です。

横向き寝になったときにアラートを出す設定です。

激しい動きが検知されたときにアラートを出す設定です。

センサーがスマートフォンの電波圏外に移動したときにアラートを出す設定です。

センサーが90cm以上落下したときにアラートを出す設定です。

電池が残り少なくなったときにアラートを出す設定です。

6. お好み設定(アラーム音の変更)

③ センサーの接続確認



「アラーム」のメニューアイコンをタップします。



アラーム音を変更したいアラートをダブルタップします。



各アラートのデフォルトのアラーム音が確認できます。



画面を下にスクロールするとアラーム音の候補が表示されます。「再生」ボタンをタップすると試聴できます。



お好みの音が決まったら、左側をタップします。



アラートメニューに戻り、このように変更後のアラーム音が表示されていれば変更完了です。

保 証 書

品名または型番	MonBaby スマートボタン体動センサ MBB-01		
製 造 番 号			
お買い上げ年月日		保証期間	1年間
お 客 様	ご 住 所	〒	
	お 名 前	(ふりがな) 様	
	T E L	()	

販 売 店	住所・販売店名・電話番号
-------------	--------------