

機械器具80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非侵襲式家庭向け鍼用器具 34675001
セラピーバンド

【警告】

- 必ず説明書に従い、本製品に付属している指圧ボタンが内関（ないかん）のツボに接触するように装着してください。
- 安静を必要とする人、医薬品、他の医療機器を使用している人、既往障害（特に、循環器、消化器）がある方は使用前に医師に相談してください。
- 指圧ボタンの跡が皮膚に残る場合がありますが、リストバンドをはずせば、数時間で消えます。身体に異常を感じたり、装着部に発疹、赤み、かゆみなどが現れたりした場合は、直ちに使用を中止し、医師等に相談してください。

【禁忌・禁止】

- 本製品の使用効果は人により異なります。
- 専門医の治療の代替品として使用しないでください。
- 製品の接触部に皮膚の異常等がある場合は使用しないでください。
- 破損、変形、劣化が認められる場合は、使用しないでください。
- 本品を改造、手首以外の装着はしないでください。

**【形状・構造及び原理】**

- 本製品は、手首等に装着する伸縮性ナイロン、ポリウレタンのリストバンドと、ツボに接触する指圧ボタンを保持するボタンおよびピンによって構成されます。
- 本製品を手首に装着することによりツボに接触します。ピン部分の上から押すことにより指圧ボタンの押す力の調節ができます。

【使用目的又は効果】

- 本製品は、つわりや乗り物酔い、ムカつきなどのストレス、緊張等から生じる不快な吐き気を緩和するツボを家庭で指圧するための器具です。
- 手首に巻き付け、皮膚との接触調節によってツボを刺激します。

【使用方法等】

- 指圧ボタンの凸側を製品の内側にします。
- リストバンドを手首に装着し内関（ないかん）のツボを刺激します。
- 内関（ないかん）のツボ位置は、手首の内側にあります。手首を軽く内側に曲げた時に現れる2本の筋の間かつ、もう片方の手の指3本（人差し指・中指・薬指）を薬指の外側が手首の大きなシワに重なるように置いた時の人差し指の下です。（大人が補助する場合でもお子様ご自身の指で測るようお願いいたします。）
- 通常、両手首の正しい位置に装着します。
- 効果が出始めるまでに2分～5分ほどかかります。（個人差があります）また必要に応じて、指圧ボタンを指の腹で押すことでより効果が得られますが、押しすぎますと内出血を起こす場合がありますので、ご注意ください。

【使用上の注意】

- 本製品は玩具ではありません。小児の手の届かない場所に保管してください。お子様が使用する場合は必ず大人の監視のもとで使用してください。
- 身体に異常を感じたり、装着部に発疹、赤み、かゆみなどの症状が現れたりした場合は、直ちに使用を中止し、医師等に相談してください。
- 強く押しすぎないように注意してください。皮膚に跡が残る場合がありますが、通常数時間で消えます。痛みが残り、皮下内出血する場合があるので十分注意してください。
- 製品の不具合を感じたときは、使用を中止してください。
- 医薬品、他の医療機器と併用する場合は、医師等に相談してください。
- 本製品は恒常的使用を目的としておりません。
- ツボの位置は人によって異なります。ご自身で効果を確認しながら使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿、直射日光を避け適切な場所に保管してください。
- 有効期間は製造年月日より5年間とします。

【取扱上の注意】

- 水洗いできますが、汚れが目立つ場合は中性洗剤などで優しく汚れを落としてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社プレシャスケア

神奈川県横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル1階

電話番号：045-319-4905

<製造業者>

Yangzhou Maihe Trading Co., Ltd

取扱説明書を必ずご参照ください。