


自動鼻洗浄器

# ハナミズキ<sup>re</sup>i

## 【ご使用方法（簡易版）】

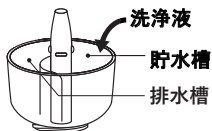

① ノズルと蓋を外し、貯水槽に、ぬるま湯程度に温めた別売洗浄液を目盛：MAXを超えない範囲で注入してください。（別売洗浄液または生理食塩水以外は使用しないでください）

② ノズルの噴射口を鼻孔に向け、電源ボタンを押すとモードランプが青く点灯し、洗浄を始めます。※ご使用中は口で呼吸することを推奨します。


③ 更に電源ボタンを押すとモードが切り替わります。長押しするとOFFになります。

洗浄後、排水は自動的に排水槽に流れます。

④ 排水槽に貯まった液を捨て、再び生理食塩水等を貯水槽に注ぎ、もう一方の鼻孔を同様に洗浄します。

⑤ ご使用後は電源をOFF、洗浄ヘッドを洗浄し、本体を乾いた布などで良く拭き取って保管してください。

※本体を直接水に浸して洗浄することは出来ません！

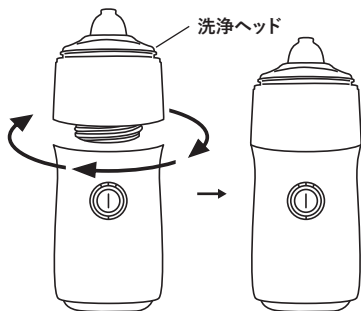

使用方法・洗浄・注意事項の詳細については、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書（詳細版）については下記QRコードよりアクセスをしてダウンロードしてください。

